


HOYA

TECHNOSURGICAL

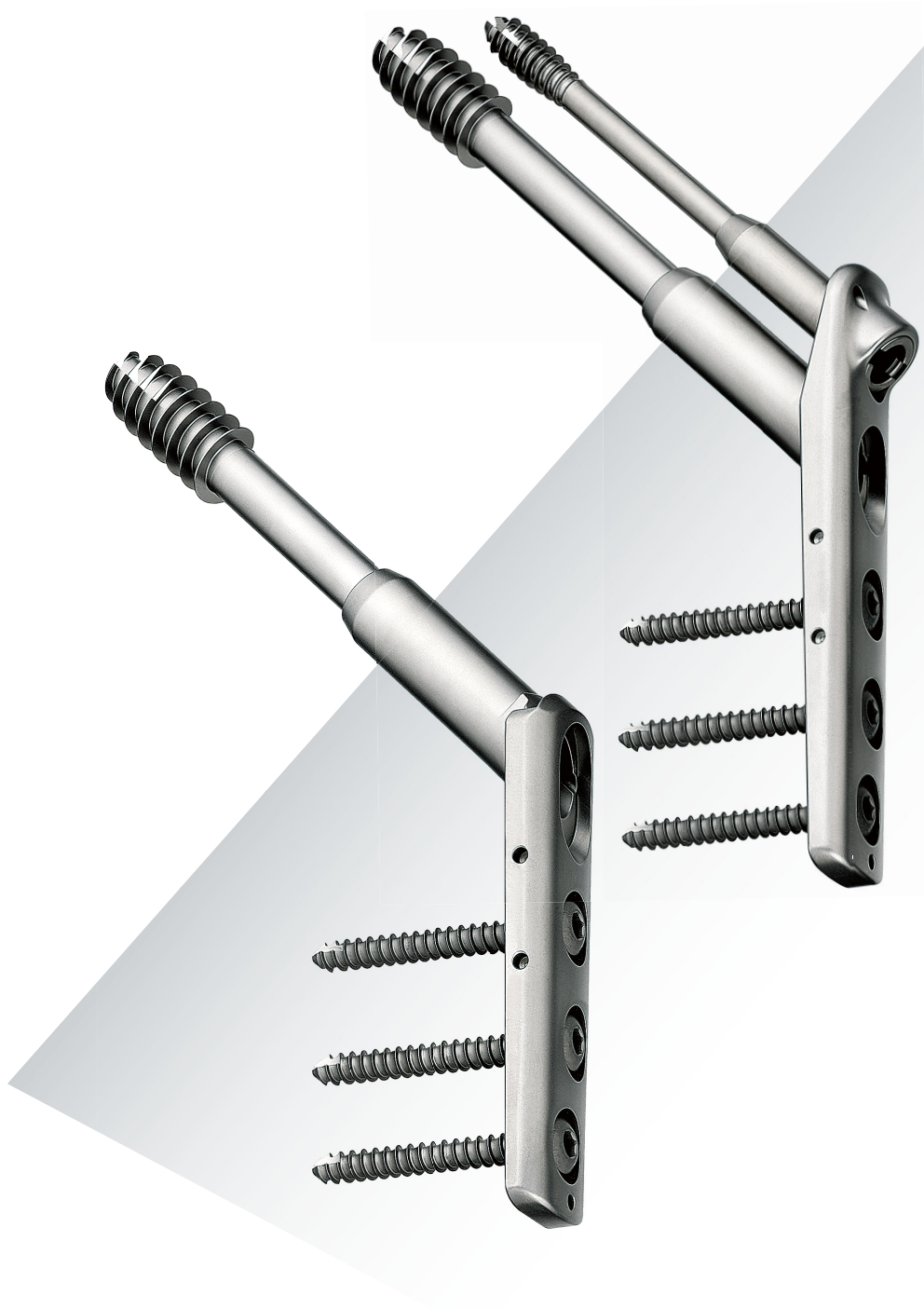

anti rotation hip screw

ARRHS

ユニテックCHSシステム

anti rotation hip screw

# AIRHS

ユニテックCHSシステム

## Feature & Benefit


- つば部分にロッキング機構を採用
- 強固な回旋防止と安定したテレスコープを確保




スライディング機構を持ったスクルータイプとピンタイプの選択が可能です。



つば部分にロッキング機構を設けた事により、telescopingによるbackoutを防ぎます。

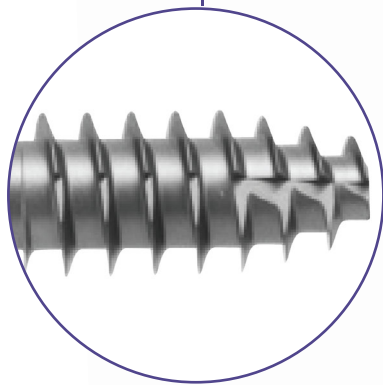


スライディングスクルーの先端部分はテーパ形状ですので、骨とインプラント間の効果的な把持力が期待できます。

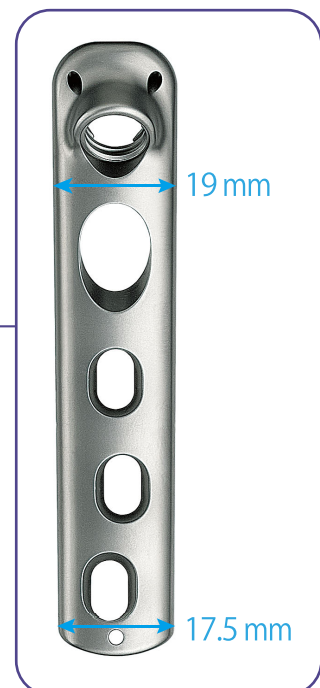

スリムな形状を獲得


# つば部：選べる4タイプ

つば部はロックピンとスライディングスクリュー、  
キャニュレイテッドスクリューの選択が可能です

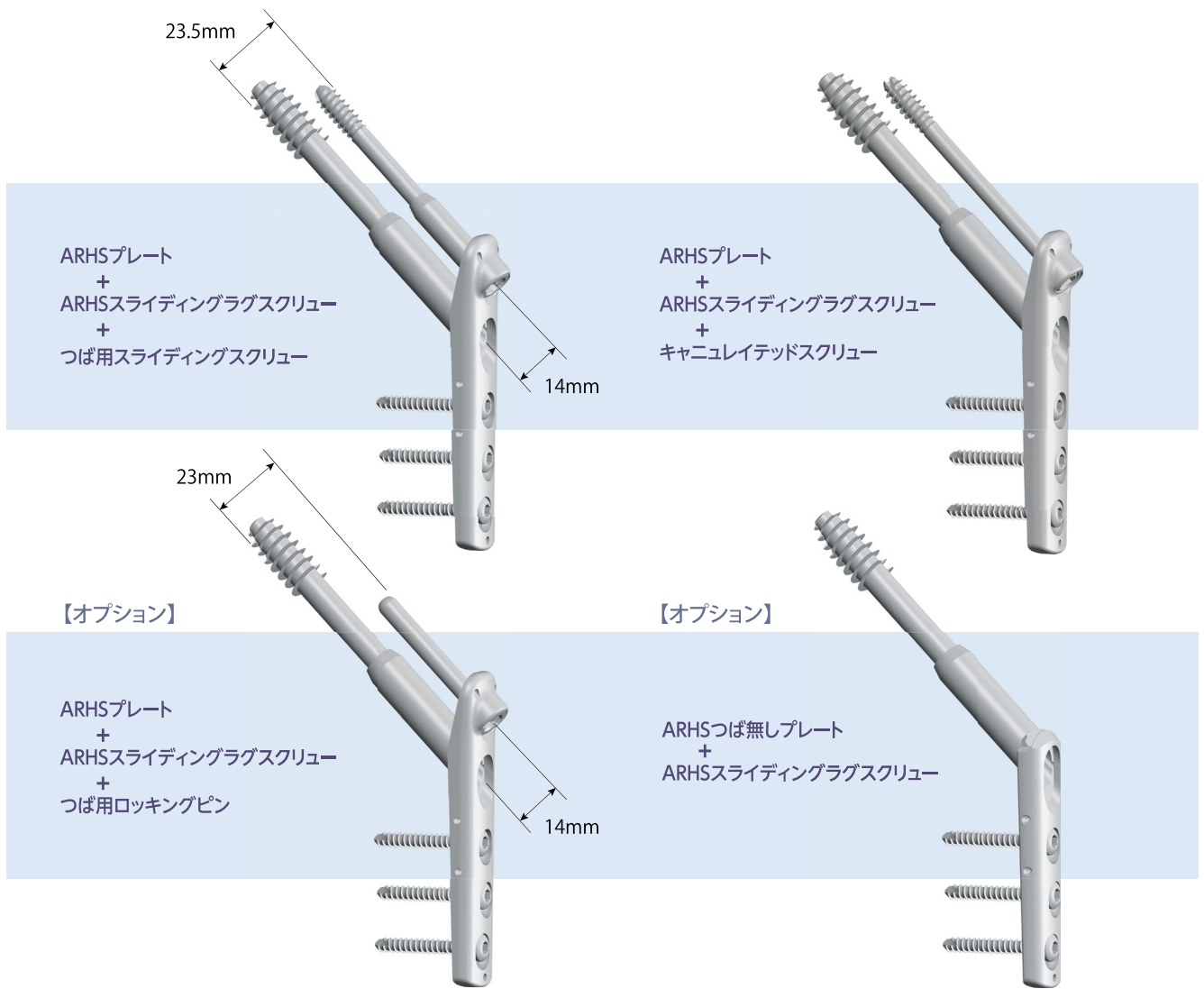

## 強度試験

不安定型骨折を再現した骨モデルを用い、加重により骨頭が変形(破損)しないよう、樹脂に骨頭を封入して把持し、オフセットした位置を押して骨頭に回旋力を与えた。

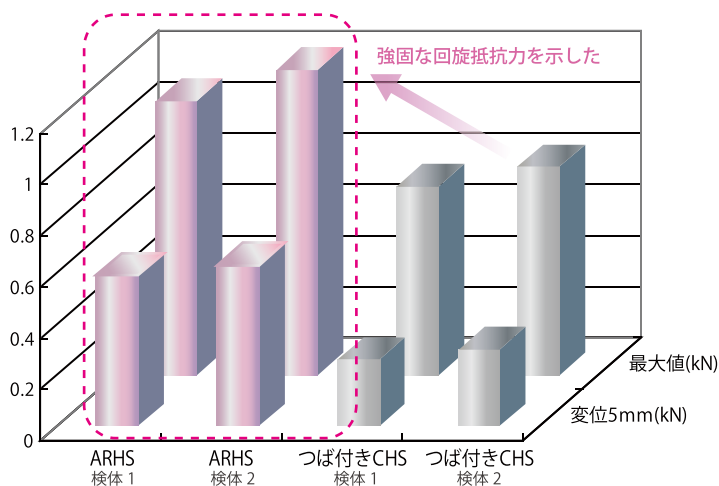


※つば用スライディングスクリュー使用時

■ ARHSは、回旋抵抗において従来のつば付きCHSより有意に高かった。

■ ARHSの場合、近位側ラグスクリュー(スライディングラグスクリュー)のロック機能のためにチョップスティック現象が発生せず、そのためスライディングラグスクリューが回旋力を受け止めることができ、強固な回旋抵抗を示した。


## ●ARHSプレート

製品番号	呼称	d(°) / 穴数	L(mm)	備考
B05D-3002	ARHSプレート	130° / 2穴	76	オプション
B05D-3003		130° / 3穴	92	
B05D-3004		130° / 4穴	108	
B05D-30XX		130° / 6穴・8穴・10穴	140・172・204	オプション
B05D-3502		135° / 2穴	77	オプション
B05D-3503		135° / 3穴	93	
B05D-3504		135° / 4穴	109	
B05D-35XX		135° / 6穴・8穴・10穴	141・173・205	オプション
B01D-02N	ARHS つば無しプレート	2穴	59	オプション
B01D-03N		3穴	75	オプション
B01D-04N		4穴	91	オプション

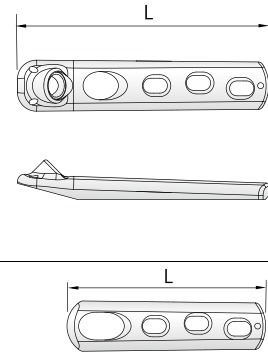

## ●ARHSスライディングラグスクリュー


製品番号	呼称	d(°) / サイズ	適応サイズ(mm)	B(mm)
D04C-30S	ARHS スライディング ラグスクリュー	130° / S	70 ~ 84	35
D04C-30M		130° / M	85 ~ 100	35
D04C-35S		135° / S	70 ~ 84	35
D04C-35M		135° / M	85 ~ 100	35
D04C-35L		135° / L	101 ~ 120	35

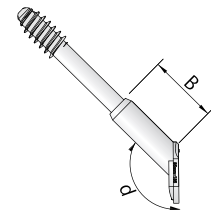

## ●つば用スライディングスクリュー

製品番号	呼称	ねじ径(mm)	L(mm)	備考
D02E-XXX	つば用スライディングスクリュー	7.0	60~120	10mm刻み


※D02E-120はオプション品になります。

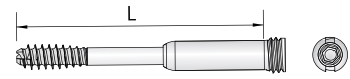

## ●つば用ロックングピン

製品番号	呼称	シャフト径(mm)	L(mm)	備考
A12M-OXX	つば用ロックングピン	6.0	40~55	5mm刻み


※A12M-040、A12M-045、A12M-050、A12M-055はオプション品になります。

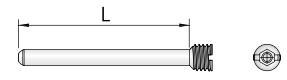

## ●キャニュレイテッドキャンセララグスクリュー


製品番号	呼称	ねじ径(mm)	L(mm)	備考
A01D-XXX	キャニュレイテッドキャンセララグスクリュー	7.0	60~110	5mm刻み

※A01D-100、A01D-105、A01D-110はオプション品になります。

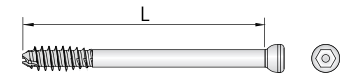

## ●コーティカルスクリュー

製品番号	呼称	ねじ径(mm)	L(mm)	備考
A02D-OXX	コーティカルスクリュー	4.5	26~44	2mm刻み

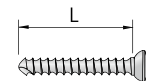


## ●ワッシャー

製品番号	呼称
C03F-01	つば用ワッシャー



## ●ロック部品

製品番号	呼称	L(mm)
A05B-015	ロックスクリュー	19

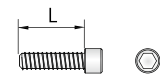

## ●ロック部品

製品番号	呼称
Y01A-001	ロックアダプター



販売元:ユニテックCHSシステム 医療機器承認番号:21400BZZ00180000  
医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ)  
体内固定用コンプレッションヒッププレート

【禁忌・禁止】<使用方法>再使用禁止

- 材質:チタン合金
- 掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
- オプション製品については弊社営業担当にお問い合わせください。
- 添付文書をよく読んでから使用してください。

製造販売業者

**HOYA Technosurgical 株式会社** [www.hoyatechnosurgical.co.jp](http://www.hoyatechnosurgical.co.jp)

- 本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711
- 札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
- 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
- 新潟営業所 〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44 TEL:025-288-0086 FAX:025-281-2066
- 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
- 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
- 福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-262-6320 FAX:092-262-6330

