


医療機器承認番号
22400BZX00472000


医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器
体内固定用プレート

ユニテック下腿骨用プレートシステム
カタログ

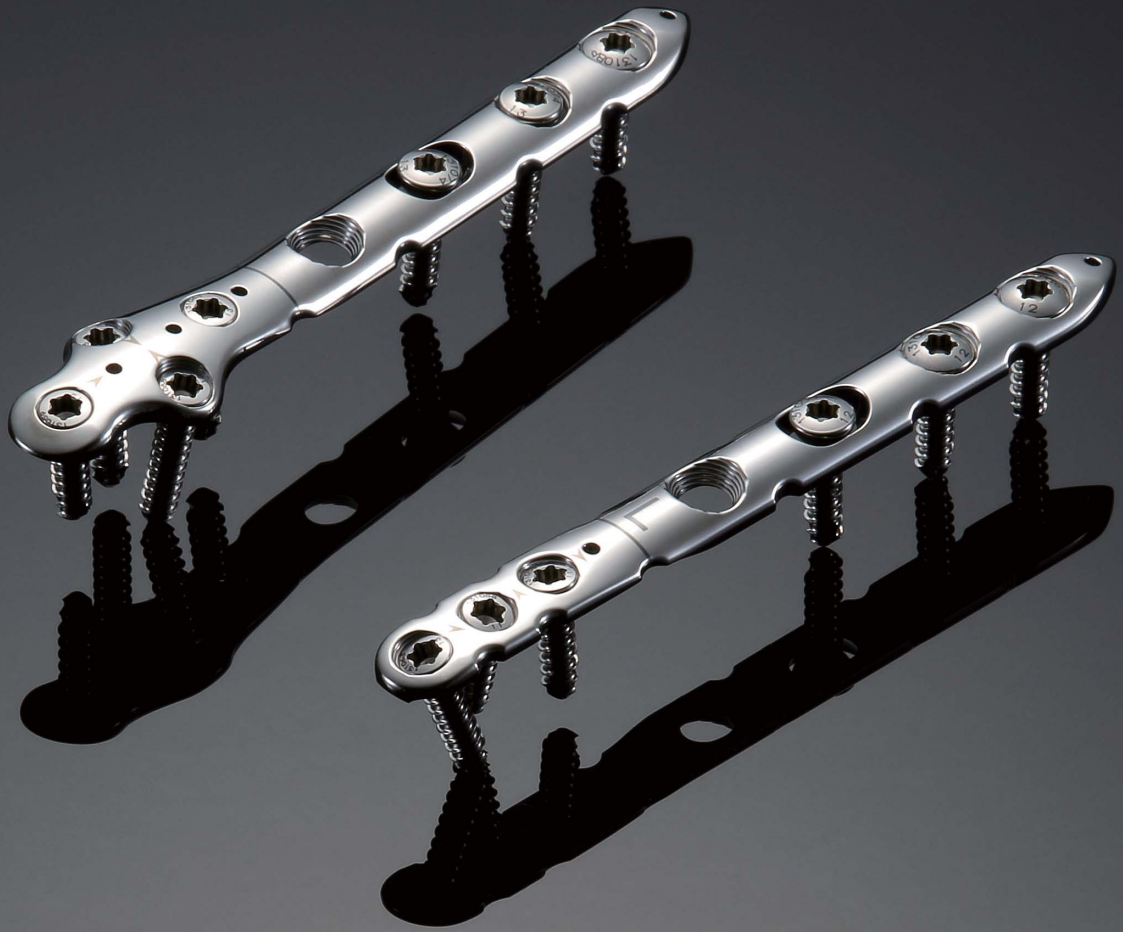

ユニテック下腿骨用プレートシステム

Fibula

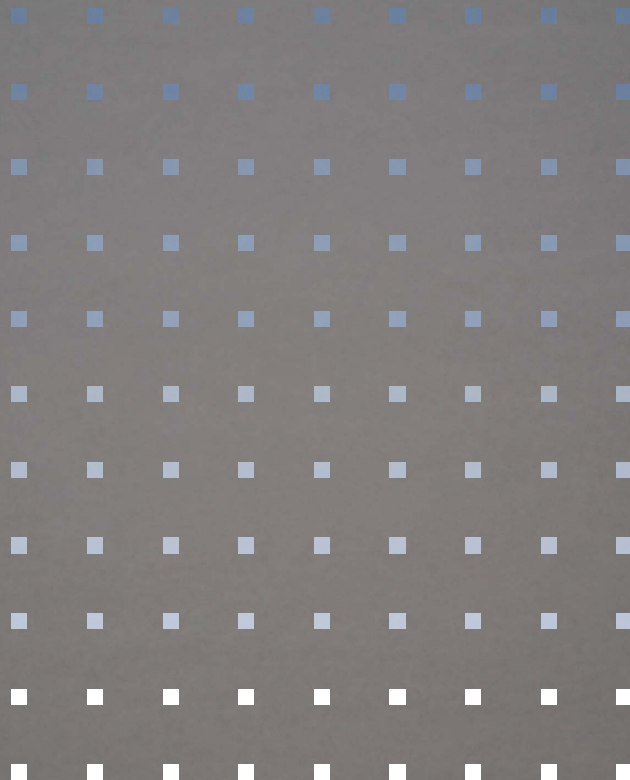


Simple and Multi functional

腓骨遠位端骨折に対し強固な固定を実現します

Narrowタイプ

Saty

bending point

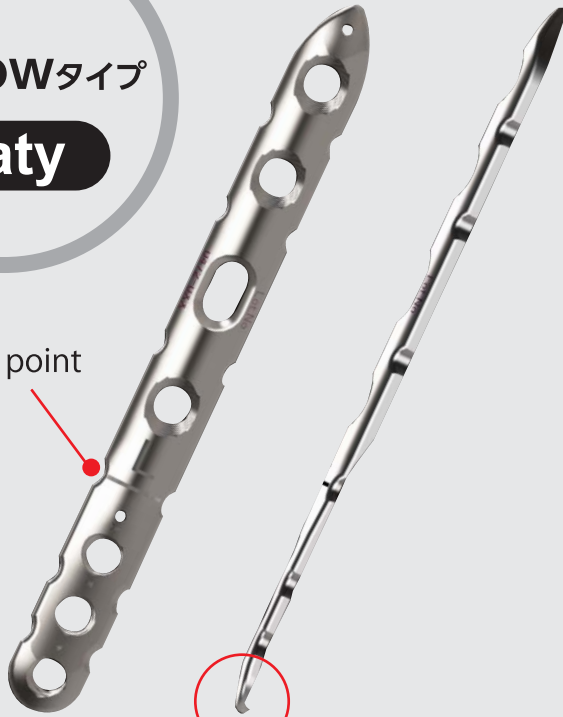

stability edge


- ・ストレート形状で設置位置に自由度を確保し、外側、後外側設置可能
- ・遠位スクリューはクロスロッキングで引き抜き強度を確保
- ・stability edgeによって、より遠位への設置可能



Wideタイプ

Suzy

bending point

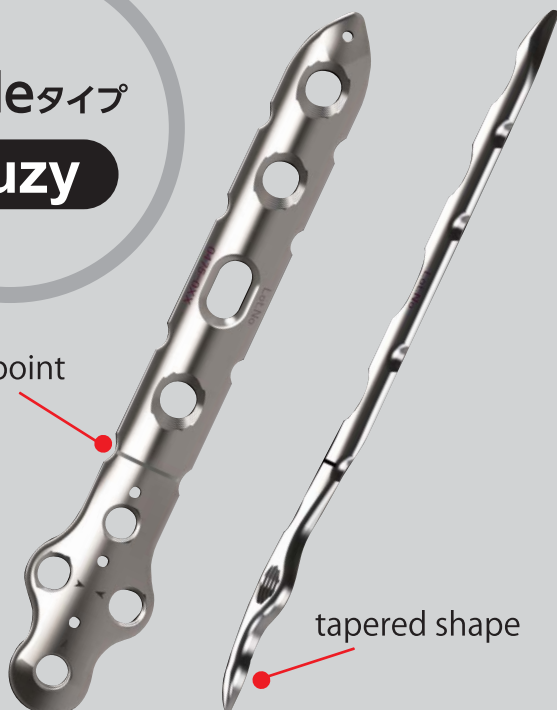

tapered shape

- ・プレート遠位のクローバー形状で強固な回旋抵抗を確保
- ・プレート遠位部も縫合しやすいテーパード形状
- ・遠位スクリューはホールドロッキングにより、回旋、引き抜きに対し強固な抵抗力をもつ




Fibula

Distal Fibula Plating System
ユニテック下腿骨用プレートシステム

Rigid Fixation

日本人の3D-CTデータを解析、アノミカル形状を再現

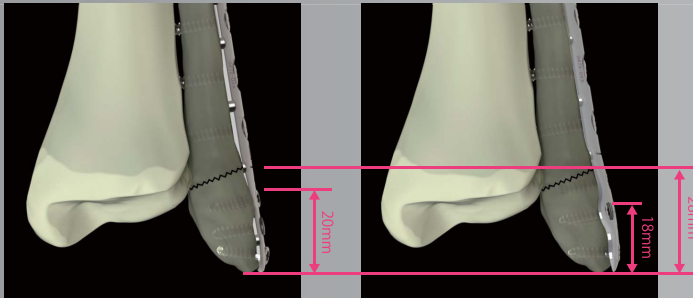

Saty


Suzy

- Saty プレート
プレート遠位端より20mm 以内に3本の
スクリューで固定可能
- Suzy プレート
プレート遠位端より28mm 以内に4本、
18mm 以内に3本のスクリューで固定可能



Saty

3本のスクリューはそれぞれ
前・後方ヘクロスロッキングし、
優れた引き抜き強度を実現

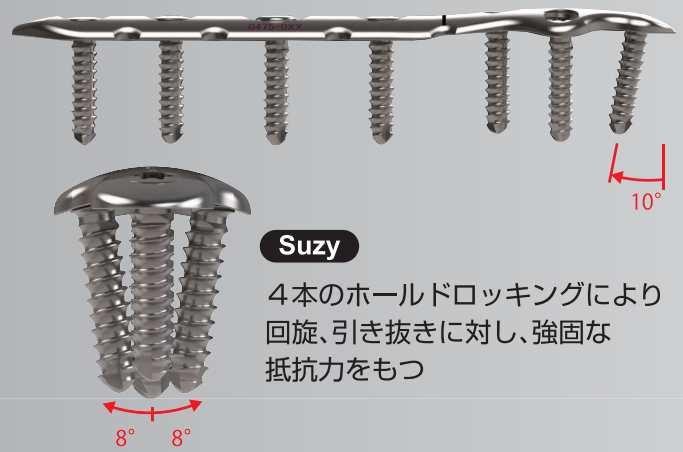

Suzy

4本のホールドロッキングにより
回旋、引き抜きに対し、強固な
抵抗力をもつ

Screw Variation

スクリューは遠位・近位ともにロッキングとノンロッキングを選択可能

■近位スクリュー



◀3.5コーティカルスクリュー

◀3.5プロキシマルFIXスクリュー

■遠位スクリュー



◀4.0キャンセラススクリュー

◀3.5ディスタールFIXスクリュー




FIXスクリュー(ロッキングスクリュー)のテーパードッキング機構

- テーパードッキング機構 : スクリューがセンタリングされ、挿入角度のずれやネジのかじりこみのリスクを軽減
- 二条ネジを採用 : ネジの嵌合する長さを保ったまま少ない回転数で容易に固定




スクリューヘッドは全てのスクリュー共通のヘクスローブタイプ(T15)を採用
動力伝達効率が高く、カムアウト現象を防止


Narrow タイプ **Saty**

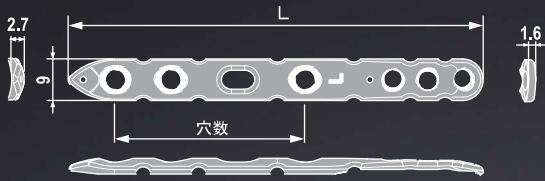


Wide タイプ **Suzy**

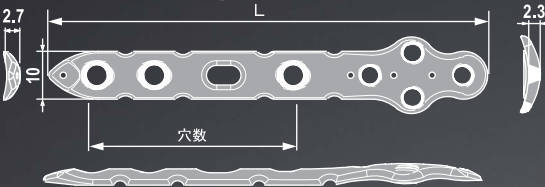


3.5 プロキシマルFIXスクリュー

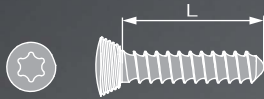


3.5 コーティカルスクリュー

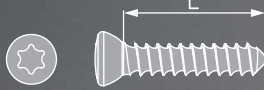

3.5 ディスタールFIXスクリュー

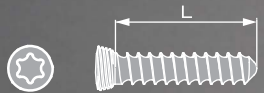

4.0 キャンセラススクリュー

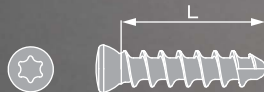

●プレート

製品番号	製品名	穴数	全長(L)	オプション
0471-003	SATY FIXタイプ 右	3	77.5mm	
0471-004	SATY FIXタイプ 右	4	89.5mm	
0471-006	SATY FIXタイプ 右	6	113.5mm	
0471-008	SATY FIXタイプ 右	8	137.5mm	*
0472-003	SATY FIXタイプ 左	3	77.5mm	
0472-004	SATY FIXタイプ 左	4	89.5mm	
0472-006	SATY FIXタイプ 左	6	113.5mm	
0472-008	SATY FIXタイプ 左	8	137.5mm	*
0475-003	SUZY FIXタイプ	3	79.6mm	
0475-004	SUZY FIXタイプ	4	91.6mm	
0475-006	SUZY FIXタイプ	6	115.6mm	
0475-008	SUZY FIXタイプ	8	139.6mm	*

●スクリュー

製品番号	製品名	全長(L)	オプション
0433-010	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	10mm	
0433-011	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	11mm	
0433-012	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	12mm	
0433-013	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	13mm	
0433-014	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	14mm	
0433-015	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	15mm	
0433-016	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	16mm	
0433-018	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	18mm	
0433-020	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	20mm	
0401-010	3.5 コーティカルスクリュー	10mm	
0401-011	3.5 コーティカルスクリュー	11mm	
0401-012	3.5 コーティカルスクリュー	12mm	
0401-013	3.5 コーティカルスクリュー	13mm	
0401-014	3.5 コーティカルスクリュー	14mm	
0401-015	3.5 コーティカルスクリュー	15mm	
0401-016	3.5 コーティカルスクリュー	16mm	
0401-018	3.5 コーティカルスクリュー	18mm	
0401-020	3.5 コーティカルスクリュー	20mm	
0401-022	3.5 コーティカルスクリュー	22mm	
0401-024	3.5 コーティカルスクリュー	24mm	
0401-026	3.5 コーティカルスクリュー	26mm	
0401-028	3.5 コーティカルスクリュー	28mm	
0401-030	3.5 コーティカルスクリュー	30mm	
0401-032	3.5 コーティカルスクリュー	32mm	*
0401-034	3.5 コーティカルスクリュー	34mm	*
0401-036	3.5 コーティカルスクリュー	36mm	*
0401-038	3.5 コーティカルスクリュー	38mm	*
0401-040	3.5 コーティカルスクリュー	40mm	*
0411-006	3.5 ディスタール FIX スクリュー	6mm	
0411-008	3.5 ディスタール FIX スクリュー	8mm	
0411-010	3.5 ディスタール FIX スクリュー	10mm	
0411-011	3.5 ディスタール FIX スクリュー	11mm	
0411-012	3.5 ディスタール FIX スクリュー	12mm	
0411-013	3.5 ディスタール FIX スクリュー	13mm	
0411-014	3.5 ディスタール FIX スクリュー	14mm	
0411-015	3.5 ディスタール FIX スクリュー	15mm	
0411-016	3.5 ディスタール FIX スクリュー	16mm	
0411-018	3.5 ディスタール FIX スクリュー	18mm	
0411-020	3.5 ディスタール FIX スクリュー	20mm	
0402-006	4.0 キャンセラススクリュー	6mm	
0402-008	4.0 キャンセラススクリュー	8mm	
0402-010	4.0 キャンセラススクリュー	10mm	
0402-012	4.0 キャンセラススクリュー	12mm	
0402-014	4.0 キャンセラススクリュー	14mm	
0402-016	4.0 キャンセラススクリュー	16mm	
0402-018	4.0 キャンセラススクリュー	18mm	
0402-020	4.0 キャンセラススクリュー	20mm	

材質：チタン合金

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711 URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

東京営業所 TEL 03-5367-8872

新潟営業所 TEL 025-288-0086

大阪営業所 TEL 06-6267-5222

福岡営業所 TEL 092-262-6320

F1100105 2016年6月