



# UNICORN NAIL

ユニコーンネイル (滅菌済)

# UNICORN NAIL

## Dedicated to Japanese

日本人の大腿骨髄腔への適合性を追求したネイルデザイン

### 高位のベンディングポイント

ネイル挿入時のジャミングを低減し  
整復位の喪失を防止

### R1300 ※参考値

前弯の強い骨形状にも適合  
しやすいデザイン

### オブリークカット

ネイル先端内側をカットし、  
スムーズな挿入を実現

160mmネイル

230mmネイル

安全ストッパー

## Simple & Intuitive


どなたにでも使いやすく術中のストレスを低減

### ツールのカラーコード化

ワンデバイス識別を容易にして  
スムーズなオペの進行をアシスト

### ターゲットデバイス

ワンデバイスで  
160mmネイルと230mmネイルを  
使用可能

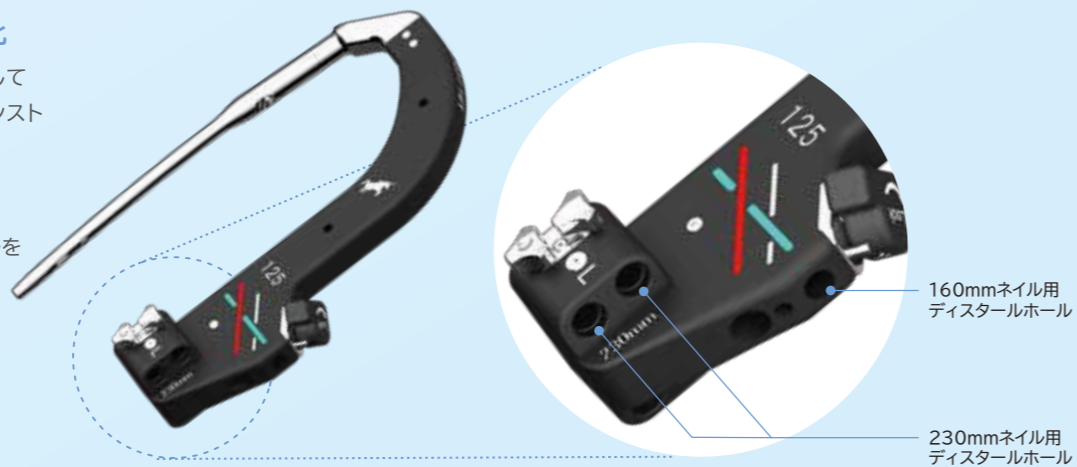

## Bioactive Augmentation

- Osteointegration -




### HTS UNICORN Cloud Kit

生体親和性と骨伝導性を有する  
ペースト状人工骨が骨と一体化します。

※裏表紙下部のQRコードから「器械説明動画」をご視聴いただけます。

### APACERAM AnchorFix

ハイドロキシアパタイト顆粒状人工骨を  
固めた中空構造の成型体であり、  
容易に補填可能です。

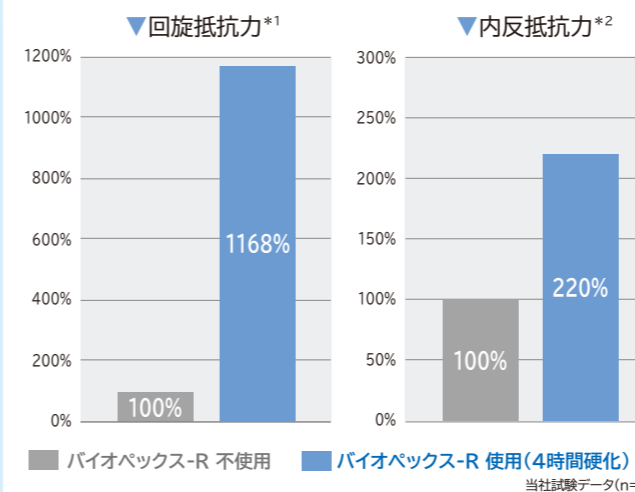

「バイオバックス-R 不使用」を100%としたときの比較

\*1 試験方法: 模擬骨が破壊するまでねじ込みトルクを負荷する。


\*2 試験方法: 模擬骨が破壊するまで静荷重を負荷する。

模擬骨: 海綿骨セル型ブロック7.5pcf

模擬骨: 海綿骨セル型ブロック7.5pcf

ラグスクリュー先端に施したセルフカッティングがAnchorFixを破碎します。

▼ラグスクリューの挿入により破碎し周囲に分散します。

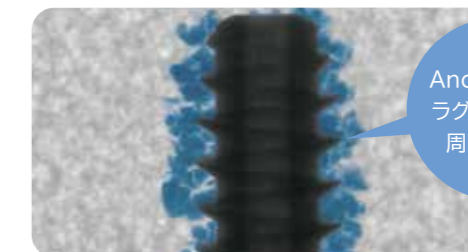


AnchorFixが  
ラグスクリュー  
周囲に分散

模擬骨にAnchorFixを補填しラグスクリューを挿入後にレントゲン撮影を実施




## ユニコーン 160mm ネイル

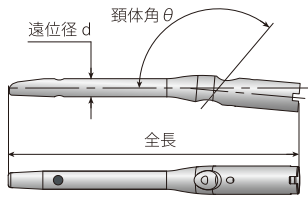

製品番号	頸体角 θ	遠位径 d	全長
ST-0601-2509	125°	Φ 9mm	160mm
ST-0601-2510		Φ 10mm	
ST-0601-2512		Φ 12mm	
ST-0601-2514*		Φ 14mm	
ST-0601-3009	130°	Φ 9mm	
ST-0601-3010		Φ 10mm	
ST-0601-3012		Φ 12mm	
ST-0601-3014*		Φ 14mm	

\* オプションになります


## ユニコーン 230mm ネイル

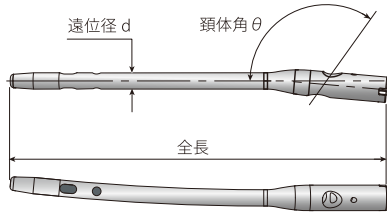

製品番号	頸体角 θ	遠位径 d	全長	
ST-0625-2310R	125°	右	Φ 10mm	230mm
ST-0625-2312R*			Φ 12mm	
ST-0630-2310R		130°	Φ 10mm	
ST-0630-2312R*			Φ 12mm	
ST-0625-2310L	125°	左	Φ 10mm	
ST-0625-2312L*			Φ 12mm	
ST-0630-2310L		130°	Φ 10mm	
ST-0630-2312L*			Φ 12mm	

\* オプションになります

## ユニコーンクラウド ラグスクリュー

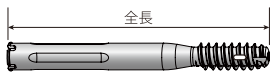


スレッド径 Φ10.3mm  
スレッド長 28.0mm  
シャフト径 Φ10.3mm

製品番号	全長
ST-0613-XXX	70~110mm 5mm刻み

70mmはオプションになります


## ディスタールスクリュー

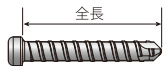

スレッド径 Φ5.0mm

製品番号	全長
ST-0620-0XX	26~42mm 2mm刻み

## エンドキャップ

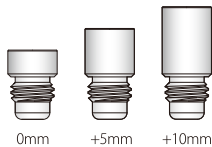

製品番号	サイズ
ST-0650-000	0mm
ST-0650-005	+5mm
ST-0650-010	+10mm

## HTS UNICORN Cloud Kit

製品番号	製品名
BPE06-1C-CL	バイオボックス-R エクセレント HTS ユニコーンクラウドセット 6mL
AEK000-02	HTS ユニコーンクラウド インジェクションツール-R

## セットスクリュー



製品番号
ST-0660-001

## APACERAM AnchorFix

外径7mm 内径3.5mm 全長25mm

製品番号	製品名
R-725	AnchorFix R-725

販売名: ユニコーンネイル (滅菌済)  
販売名: ユニコーンネイル 用手術器械  
販売名: バイオボックス-R  
販売名: HTS バイオボックス注入器  
販売名: アパセラム-FX

医療機器承認番号: 22700BZX00280000  
医療機器届出番号: 13B1X10173206101  
医療機器承認番号: 21300BZZ00274000  
医療機器届出番号: 13B1X10173101028  
医療機器承認番号: 22200BZX00814000

体内固定用大腿骨髄内釘  
骨手術用器械  
人工骨インプラント  
手動式整形外科用セメントディスペンサ  
人工骨インプラント

高度管理医療機器 (クラスIII)  
一般医療機器 (クラスI)  
高度管理医療機器 (クラスIII)  
一般医療機器 (クラスI)  
高度管理医療機器 (クラスIII)

製造販売業者

## HOYA Technosurgical 株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社	〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4	TEL: 03-5369-1710	FAX: 03-5369-1711
■ 札幌営業所	〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL: 011-241-3473	FAX: 011-241-3472
■ 仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL: 022-371-6944	FAX: 022-371-8924
■ 新潟営業所	〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44	TEL: 025-288-0086	FAX: 025-281-2066
■ 名古屋営業所	〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27	TEL: 052-955-8572	FAX: 052-955-8573
■ 大阪営業所	〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9	TEL: 06-6263-1679	FAX: 06-6263-1686
■ 福岡営業所	〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL: 092-262-6320	FAX: 092-262-6330



ユニコーン、ユニコーンネイル、unicorn cloud、AnchorFixは HOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。

⇨「HTS UNICORN Cloud kit 器械説明動画」  
アクセスパスワードは弊社担当にお問い合わせ下さい。