

医療機器承認番号
22400BZX00472000


医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器
体内固定用プレート

ユニテック下腿骨用プレートシステム
カタログ



ユニテック下腿骨用プレートシステム

Fibula

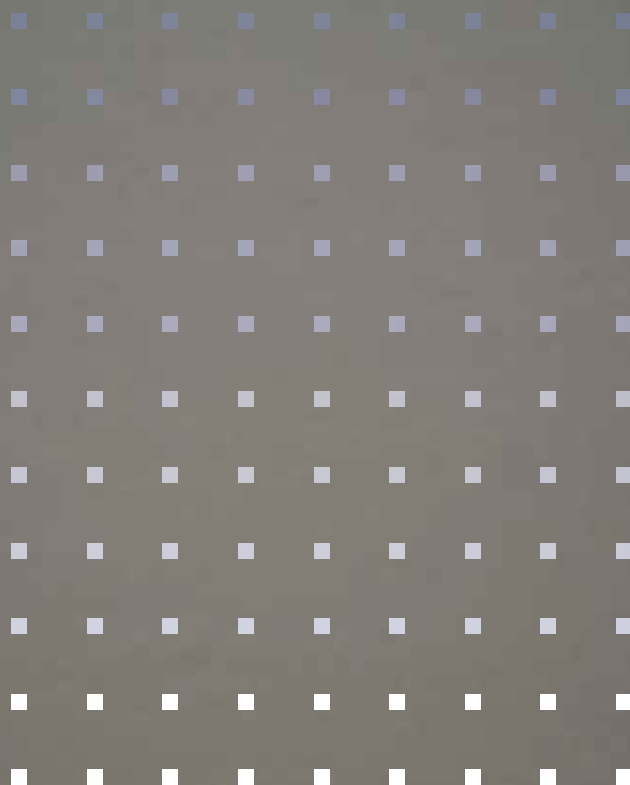


Simple and Multi functional

腓骨遠位端骨折に対し強固な固定を実現します

Narrowタイプ

Saty

bending point

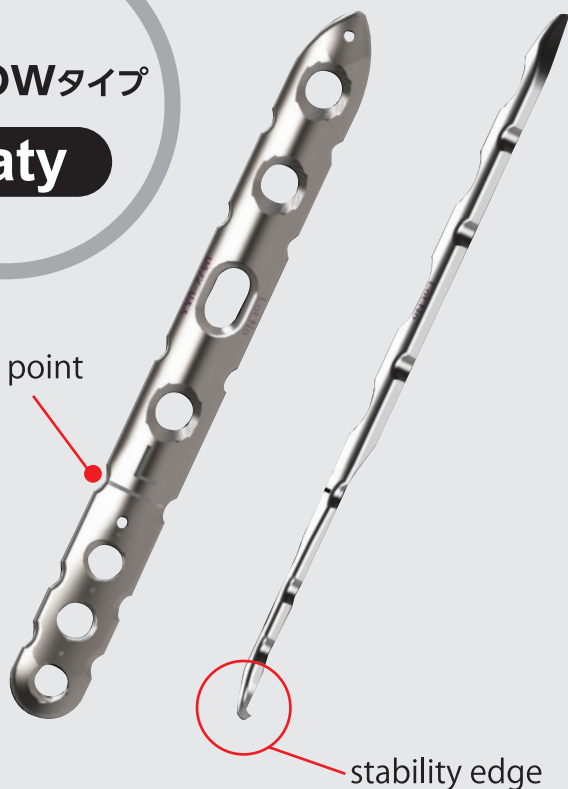

stability edge


- ・ ストレート形状で設置位置に自由度を確保し、外側、後外側設置可能
- ・ 遠位スクリューはクロスロッキングで引き抜き強度を確保
- ・ stability edgeによって、より遠位への設置可能



Wideタイプ

Suzy

bending point

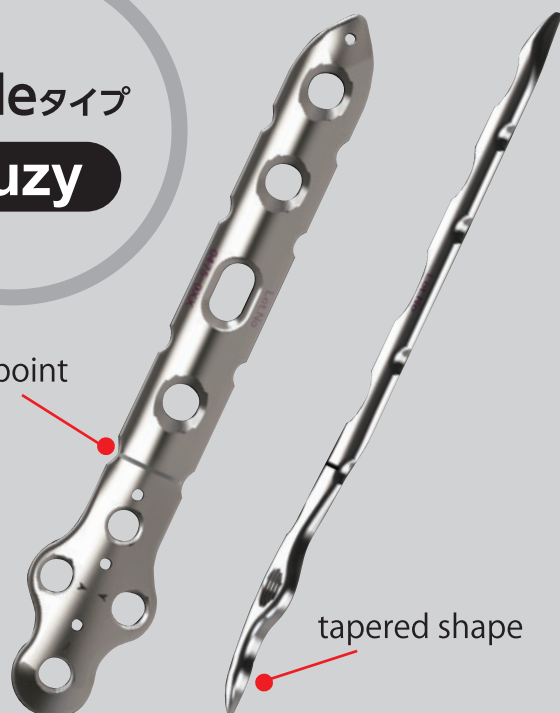

tapered shape

- ・ プレート遠位のクローバー形状で強固な回旋抵抗を確保
- ・ プレート遠位部も縫合しやすいテーパード形状
- ・ 遠位スクリューはホールドロッキングにより、回旋、引き抜きに対し強固な抵抗力をもつ




Fibula

Distal Fibula Plating System


ユニテック下腿骨用プレートシステム

Rigid Fixation

日本人の3D-CTデータを解析、アノミカル形状を再現

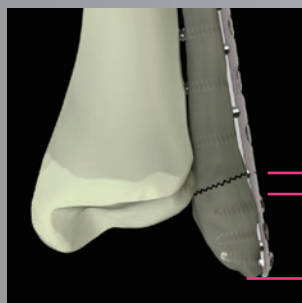

Saty

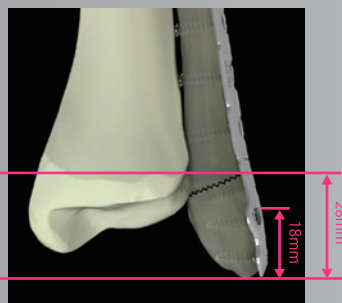

Suzy

- Saty プレート
プレート遠位端より20mm 以内に3本の
スクリューで固定可能
- Suzy プレート
プレート遠位端より28mm 以内に4本、
18mm 以内に3本のスクリューで固定可能



10° 10°

Saty

3本のスクリューはそれぞれ
前・後方ヘクロスロッキングし、
優れた引き抜き強度を実現



8° 8°

Suzy

4本のホールドロッキングにより
回旋、引き抜きに対し、強固な
抵抗力をもつ

Screw Variation

スクリューは遠位・近位ともにロッキングとノンロッキングを選択可能

■近位スクリュー



◀3.5コーティカルスクリュー

◀3.5プロキシマルFIXスクリュー

■遠位スクリュー



◀4.0キャンセラススクリュー

◀3.5ディスタールFIXスクリュー




FIXスクリュー(ロッキングスクリュー)のテーパロック機構

テーパ機構 : スクリューがセンタリングされ、挿入角度のずれやネジのかじりこみのリスクを軽減
二条ネジを採用 : ネジの嵌合する長さを保ったまま少ない回転数で容易に固定




スクリューヘッドは全てのスクリュー共通のヘクスローブタイプ(T15)を採用
動力伝達効率がよく、カムアウト現象を防止


Narrow タイプ **Saty**

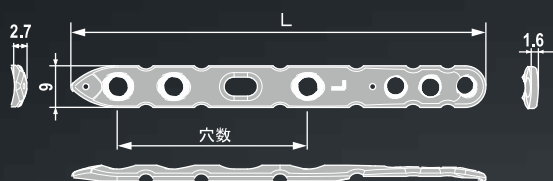


Wide タイプ **Suzy**

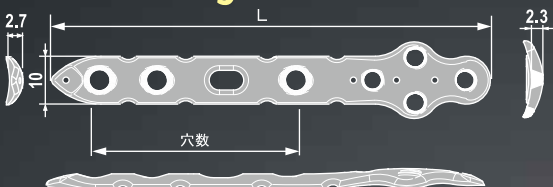


3.5 プロキシマルFIXスクリュー

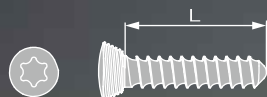


3.5 コーティカルスクリュー

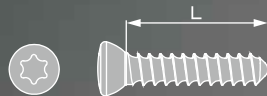

3.5 ディスタールFIXスクリュー

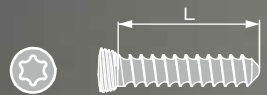

4.0 キャンセラススクリュー

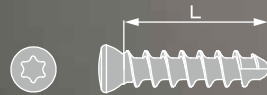

●プレート

製品番号		製品名	穴数	全長(L)	オプション
0471-003	Narrow タイプ	SATY FIX タイプ 右	3	77.5mm	
0471-004		SATY FIX タイプ 右	4	89.5mm	
0471-006		SATY FIX タイプ 右	6	113.5mm	
0471-008		SATY FIX タイプ 右	8	137.5mm	*
0472-003		SATY FIX タイプ 左	3	77.5mm	
0472-004		SATY FIX タイプ 左	4	89.5mm	
0472-006		SATY FIX タイプ 左	6	113.5mm	
0472-008		SATY FIX タイプ 左	8	137.5mm	*
0475-003	Wide タイプ	SUZY FIX タイプ	3	79.6mm	
0475-004		SUZY FIX タイプ	4	91.6mm	
0475-006		SUZY FIX タイプ	6	115.6mm	
0475-008		SUZY FIX タイプ	8	139.6mm	*

●スクリュー

製品番号		製品名	全長(L)	
0433-010	近位	3.5 プロキシマル FIX スクリュー	10mm	
0433-011		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	11mm	
0433-012		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	12mm	
0433-013		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	13mm	
0433-014		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	14mm	
0433-015		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	15mm	
0433-016		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	16mm	
0433-018		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	18mm	
0433-020		3.5 プロキシマル FIX スクリュー	20mm	
0401-010		3.5 コーティカルスクリュー	10mm	
0401-011		3.5 コーティカルスクリュー	11mm	
0401-012		3.5 コーティカルスクリュー	12mm	
0401-013		3.5 コーティカルスクリュー	13mm	
0401-014		3.5 コーティカルスクリュー	14mm	
0401-015		3.5 コーティカルスクリュー	15mm	
0401-016		3.5 コーティカルスクリュー	16mm	
0401-018		3.5 コーティカルスクリュー	18mm	
0401-020		3.5 コーティカルスクリュー	20mm	
0401-022		3.5 コーティカルスクリュー	22mm	
0401-024		3.5 コーティカルスクリュー	24mm	
0401-026		3.5 コーティカルスクリュー	26mm	
0401-028		3.5 コーティカルスクリュー	28mm	
0401-030		3.5 コーティカルスクリュー	30mm	
0401-032		3.5 コーティカルスクリュー	32mm	*
0401-034		3.5 コーティカルスクリュー	34mm	*
0401-036		3.5 コーティカルスクリュー	36mm	*
0401-038		3.5 コーティカルスクリュー	38mm	*
0401-040		3.5 コーティカルスクリュー	40mm	*
0411-006	遠位	3.5 ディスタール FIX スクリュー	6mm	
0411-008		3.5 ディスタール FIX スクリュー	8mm	
0411-010		3.5 ディスタール FIX スクリュー	10mm	
0411-011		3.5 ディスタール FIX スクリュー	11mm	
0411-012		3.5 ディスタール FIX スクリュー	12mm	
0411-013		3.5 ディスタール FIX スクリュー	13mm	
0411-014		3.5 ディスタール FIX スクリュー	14mm	
0411-015		3.5 ディスタール FIX スクリュー	15mm	
0411-016		3.5 ディスタール FIX スクリュー	16mm	
0411-018		3.5 ディスタール FIX スクリュー	18mm	
0411-020		3.5 ディスタール FIX スクリュー	20mm	
0402-006		4.0 キャンセラススクリュー	6mm	
0402-008		4.0 キャンセラススクリュー	8mm	
0402-010		4.0 キャンセラススクリュー	10mm	
0402-012		4.0 キャンセラススクリュー	12mm	
0402-014		4.0 キャンセラススクリュー	14mm	
0402-016		4.0 キャンセラススクリュー	16mm	
0402-018		4.0 キャンセラススクリュー	18mm	
0402-020		4.0 キャンセラススクリュー	20mm	

材質：チタン合金

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711 URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

東京営業所 TEL 03-5367-8872

新潟営業所 TEL 025-288-0086

大阪営業所 TEL 06-6267-5222

福岡営業所 TEL 092-262-6320

F100105 2016年6月